



Inleiding

Beschrijving


Gebruik

Onderhoud

Jaarlijkse inspectie

Onderdelenlijst

Garantie bepalingen

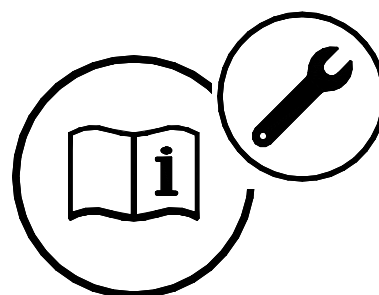

Raisa *basic*

Inhoudsopgave

1	Inleiding	
1.1	Dit handboek	2
1.2	Gebruikte symbolen	2
1.3	Inhoud verpakking	2
1.4	De Raisa basic	2
1.5	Aandachtspunten	3
2	Beschrijving	
2.1	Technische specificaties	4
2.2	Overzicht Raisa basic	4
2.3	Handbediening	5
2.4	Controle box	5
2.4.1	Noodstop	5
2.4.2	Controle box bediening	5
2.4.3	Controle lampjes	5
2.5	Batterij	5
2.5.1	Opladen van de batterij	6
2.5.2	Levensduur van de batterij	6
2.6	Hefmotor	6
2.7	Onderstel	6
2.8	Wielen	6
2.9	Low-zone band	7
2.9.1	De tilband clip	7
2.9.2	Was instructie	7
3	Gebruik	
3.1	Ingebruikname	8
3.2	Het laten staan van de zorgvrager	8
3.3	Het laten zitten van de zorgvrager	8
3.4	Als de Raisa basic niet werkt	8
4	Onderhoud	
4.1	Onderhoud	9
4.1.1	Dagelijks onderhoud	9
4.1.2	Wekelijks onderhoud	9
4.1.3	½ Jaarlijks onderhoud	9
4.1.4	Jaarlijkse inspectie en onderhoud	9
4.3	Onderdelenlijst Raisa basic	10
5	Appendix	
5.1	Garantiebepalingen	11
5.2	Verwijdering onderdelen	11
5.3	Over United Care	11
5.4	Contact	11
5.5	EG- Verklaring van overeenstemming	12

1 Inleiding

1.1 Dit handboek

Het doel van dit handboek is om zorgverleners de Raisa te kunnen laten bedienen en onderhouden.

De handleiding gaat in op de volgende aspecten:

- Beschrijving van de delen
- Beschrijving van de werking
- Stap-voor-stap tilinstructies
- Onderhoud, door de zorgverlener uit te voeren

1.2 Gebruikte symbolen



Attentie punt



Let op hoogspanning



De fabrikant van het product



Leest eerst het handboek alvorens de lift te bedienen



De Raisa basic stalift voldoet aan de EMC-norm 60601-1-2 en heeft het CE-certificaat.

1.3 Inhoud van de verpakking

Verwijder de verpakking van de Raisa en controleer de inhoud van de verpakking aan de hand van de paklijst.

- Raisa basic stalift
- Batterij
- Low-zone band (of tilvest)
- Handboek
- Quick reference

1.4 De Raisa basic

De Raisa helpt om zorgvragers vanuit een zittende naar een staande houding te brengen en andersom. De zorgverlener kan de zorgvrager op een veilige en efficiënte wijze te laten staan, zitten en verplaatsen (transfer). Door zijn eenvoud is de Raisa heel gemakkelijk in het gebruik. Het is een compacte wendbare stalift bedoelt voor de thuiszorg.



De Raisa kan worden gebruikt bij bijvoorbeeld de volgende transfers.

- Van en naar stoel / rolstoel.
- Van en naar toilet
- Van en naar een bed / brancard.
- Van en naar douche/bad-toiletstoel.

De Raisa is minder geschikt voor zorgvragers met zeer weinig spierfunctie in schouder, gordel of benen en niet geschikt voor zorgvragers met een te laag bewustzijn. Schakel bij twijfel uw zorgmanagement in.

Hij heeft een snelle en robuuste hefmotor en kan hierdoor een persoon van 160kg veilig tot staan brengen. De poten van het onderstel zijn traploos in breedte verstelbaar voor betere positionering. De kniesteunen passen zich vanzelf aan op de stand van het scheenbeen en de knieën.

Gebruik de Raisa altijd in combinatie met een door United Care geleverde low-zone band, tilvest of een hieraan gelijkwaardige band.

Afgezien van tilbanden en batterijen is de te verwachten levensduur van de Raisa basic 10 jaar (of bij 100.000 transfers). Dit is bij normaal gebruik, onder normale omstandigheden en bij onderhoud volgens voorschrift.

1 Inleiding

1.5 Aandachtspunten



De Raisa basic is ontworpen om in combinatie met een low-zone band of tilvest een zorgvrager te laten staan en te verplaatsen en mag als zodanig ook alleen voor dit doel worden gebruikt. Elk ander gebruiksdoel is niet toegestaan.

Het bedienen van de lift is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde personen.

Het is niet toegestaan om samen met de zorgvrager ook andere delen (bijvoorbeeld een stoel of rolstoel) op te tillen.

De Raisa is ontworpen voor personen tot en met een gewicht van 160kg, tenzij op de lift anders is aangegeven.

Controleer bij het aanrijden en het verrijden van de lift altijd de ruimte, waar de transfer plaatsvindt, vrij is van obstakels. Kijk hiervoor ook onder bed of (rol)stoel. De lift mag niet met de poten of de hefarm vastlopen of blijven vasthaken.

De lift mag niet worden gebruikt op hellende vlakken met een hellingshoek van meer dan 7 graden.

Behandel de lift met zorg en zorg voor een schone en nette werkomgeving.

Gebruik de Raisa alleen in combinatie met een door United Care geleverde low-zone band of tilvest. Neem bij voorgenomen gebruik van een ander soort tilband contact op met United Care.

Het bevestigen van de clips van de tilband aan de Raisa dient zorgvuldig te gebeuren, het niet juist aanbrengen van een clip kan het gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.

De hefmotor van de lift is alleen bedoeld voor het omhoog duwen van de hefarm, en mag niet als steun of als handgreep worden gebruikt.

De Raisa basic dient minimaal één keer per jaar periodiek geïnspecteerd te worden.

Service en onderhoud aan de lift is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde personen.

United Care is niet verantwoordelijk voor problemen met niet-originele onderdelen.

Het vervangen van constructieve delen van de lift is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde personen.

Batterijen opladen dient altijd te geschieden in een goed geventileerde droge ruimte. Laders dienen te worden aangesloten volgens de geldende installatievoorschriften. Laders dienen minimaal één keer per jaar periodiek geïnspecteerd te worden.

Indien er schade of vervormingen zijn opgetreden aan de lift door ongelukken, foutief gebruik of door transport, dan mag deze niet meer worden gebruikt en dient te worden teruggestuurd naar de leverancier.

Bij twijfel over de gesteldheid van de lift of de toebehoren is het raadzaam om contact op te nemen met United Care.



2 Beschrijving



2.1 Technische specificaties

Specificaties Raisa basic:

Totaal gewicht	49kg
Tilcapaciteit	160kg
Geluidsdruk	Belast heffen 48dB
	Belast poten 52dB

Electronica van de Raisa:

Hef motor	24Vdc, 10.5A max, IPx4, 7.5kN, 10% inschakelduur
Spreadmotoren	24Vdc, 2.3A max, IPx4 1.5kN, 10% inschakelduur
Controlebox	24Vdc, 10A max, IPX4, 10% inschakelduur
Oplader	Primair :100-240Vac 50/60Hz, 400mA Secundair: 28,5VDC 37-53W EN60601-1, IPX4
Handbediening	IPX4, 4 functies
Batterij	Pb accu, 24Vdc, 2x 12V/2.9Ah Li-Ion accu, 24Vdc, 2.9A

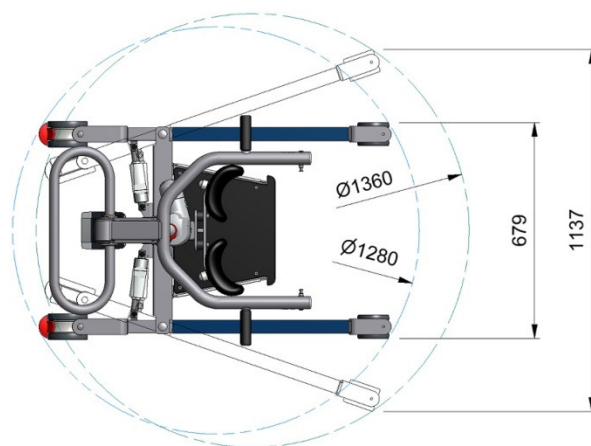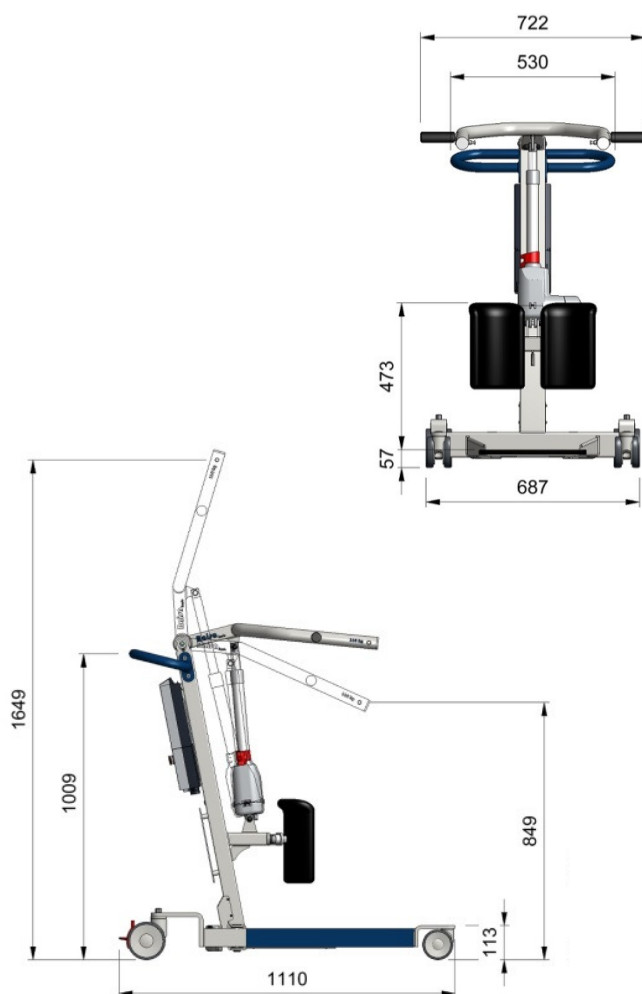

2.2 Overzicht Raisa basic

De onderdelen uit figuur 1 worden in een eigen sectie nader beschreven.

1	Onderstel	blz. 6	- § 2.9
2	Hefarm		
3	Hefmotor	blz. 6	- § 2.8
4	Batterij	blz. 5	- § 2.5
5	Controlebox	blz. 5	- § 2.4.1
6	Handbediening	blz. 5	- § 2.3
7	Poot		
8	Pootverstelling	blz. 6	- § 2.9
9	Wielen	blz. 6	- § 2.9.1
10	Duwbeugel		
11	Kniesteunen		
12	Voetenplank		
13	Low-zone band	blz. 7	- § 2.10



Figuur 1

2 Beschrijving

2.3 Handbediening

De Raisa basic kan worden bediend met de handbediening en op de controle box. Door de krulsnoer kun je tijdens het tillen naast de zorgvrager staan. De handbediening wordt gebruikt om:

- de lift omhoog of omlaag te bewegen.
- poten elektrisch te spreiden.


De bedieningsknoppen staan hieronder afgebeeld



2.4 Controle box

De motor worden aangestuurd door de controle box, dat onder de duwbeugel, tegen het frame zit bevestigd. Bovenop de controle box zit een batterij die zorgt voor de stroomvoorziening. Onderop de controle box zitten de motor, handbediening en netsnoer aansluitingen.

In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op de bediening ervan.

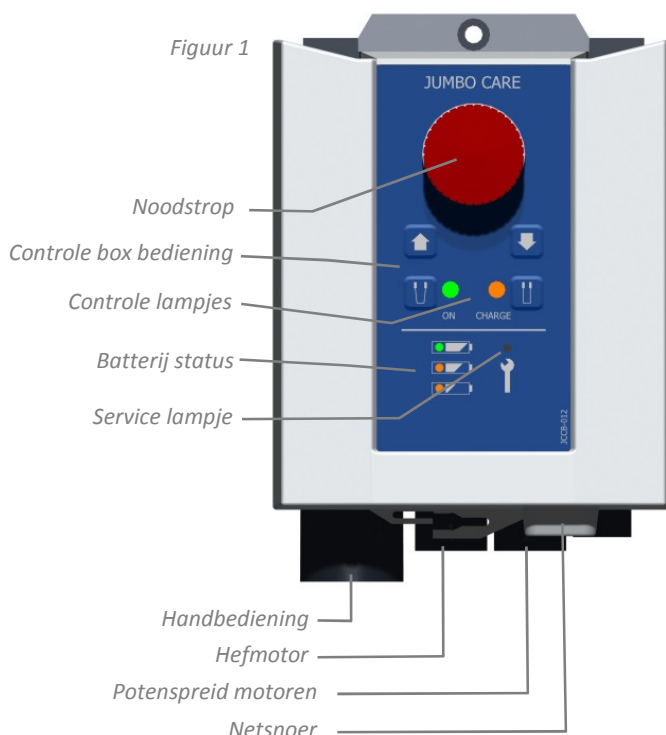

2.4.1 Noodstop

Door het indrukken van de rode noodstopknop (figuur 2) stopt de lift onmiddellijk met bewegen. Het opheffen van de noodstop doe je door aan de knop te draaien

Gebruik de noodstop ook om de lift uit te zetten wanneer je de lift langere tijd niet nodig bent. Hierdoor wordt het langzaam ontladen van de batterij tot het minimale beperkt.

2.4.2 Controle box bediening

De knoppen van de handbediening zitten ook op de controle box (figuur 2). Dit kan worden gebruikt wanneer de handbediening niet werkt, kwijt is of buiten bereik hangt.

2.4.3 Controle lampjes

Op de controle box zitten een aantal lampjes. Het groene controle lampje "on" (zie figuur 1) betekend dat de controle box aan staat en klaar is voor gebruik. Het lampje "charge" er naast gaat branden als de batterij wordt geladen. Hoe vol de batterij is kun je aflezen op de "batterij status" lampjes (zie blz.6).

Het "service" lampje met daaronder het teken van een steeksleutel gaat branden als de lift toe is aan een servicebeurt. Deze zal oranje gaan knipperen en kan worden gereset door een service monteur. Dit is om te kunnen garanderen dat de lift veilig is en blijft.

2.5 Batterij

Er zijn twee soorten batterijen verkrijgbaar. Lood (Pb) batterijen en Lithium-Ion (Li-ion) batterijen. Standaard zit er een Pb Batterij bij de lift.

Pb Batterijen zijn goedkoper in aanschaf en hebben de eigenschap dat als de batterij bijna leeg is de lift altijd nog is te gebruiken met de rest stroom, Li-ion batterijen zijn van het een op ander leeg. Li-ion batterijen hebben ongeveer 5x langere levensduur, zijn lichter, milieuvriendelijker en kunnen langer ongebruikt liggen. De zelfontlading is minimaal.

(Art.nr. Pb batterij = 31101070, Li-Ion batterij = 31101071)

De batterij is voorzien van een eenvoudig bevestigingsmechanisme. Aan de achterzijde van de accu zit een handgreep waarmee je de batterij op de Raisa basic vergrendelt en ontgrendelt. Dit gaat het best door de handgreep van de batterij tijdens het plaatsen aan de bovenzijde in te drukken zodat de vergrendeling open staat bij plaatsing.

Het is ook mogelijk om een tweede batterij bij de lift te nemen om zeker te zijn van een volle batterij. Ook kan hier een losse wandlader bij worden geleverd (32106680).

Zorg altijd dat de batterij voldoende is opgeladen voordat je de Raisa gaat gebruiken.



2 Beschrijving

2.5.1 Opladen van de batterij



Batterijen worden opgeladen met de interne batterijlader in de controle box.

Om te weten of de batterij moet worden opgeladen is op de controle box een batterij-indicator aanwezig.



Batterij vol – lift kan worden gebruikt.



Batterij halfvol – lift kan gebruikt worden.
Laad de batterij na gebruik op



Batterij leeg - Lift moet worden opgeladen

Laad de batterij op volgens onderstaande procedure:

- Plaats de accu op de Controle box.
- Draai het noodstop uit (lift aan zetten).
Het groen lampje "ON" brandt
- Sluit het netsnoer aan op het lichtnet.
Het oranje lampje "CHARGE" gaat branden
- Tijdens het laden brandt het lampje 'charge'.
- Als de batterij volledig is opgeladen zal het lampje 'charge' uitgaan.
- Houd rekening met een oplaadtijd van ca. 8 uur.



Aangeraden wordt om de batterijen minimaal één maal per week te laden. Li-Ion batterijen kunnen langer ongebruikt liggen, maar ook deze batterijen kunnen het beste met regelmaat worden geladen.

Het regelmatig laden van de batterij voorkomt problemen en verlengt de levensduur van de batterij.



2.5.2 Levensduur van de batterij

Het aantal tilbewegingen dat met een volledig opgeladen batterij gemaakt kan worden is afhankelijk van de duur van de tilhandelingen, het getilde gewicht en de ouderdom en conditie van de batterij.

Een batterij dat voor een langere tijd niet wordt gebruikt loopt langzaam leeg. Het te ver ontladen van de batterij is nadelig voor de capaciteit van de batterij.

Qua levensduur maakt het uit welke soort batterij wordt gebruikt. Li-Ion batterijen gaan langer mee dan Pb batterijen. Bij uitvoerig gebruik kan de Li-ion tot zo'n 5x langer meegaan.

Veroudering en niet regelmatig opladen is nadelig voor de levensduur. De sterkte en het laadgedrag van beide is gelijk.

Om problemen te voorkomen is het aan te raden de (Pb) batterij om de twee jaar te vervangen.

2.6 Hefmotor

De motor is een hele snelle, geluidsarme en robuuste motor. Het is voorzien van een kogelomloop spindel en elektrische splines. Elektrische splines betekend dat de motor bij het dalen afslaat als er iets (b.v. schouders) onder de hefarm komt. De motor heeft inwendige eindschakelaars.

De motor wordt aangesloten op de controle box (figuur 2). Aan de controle box zit een handbediening voor het aansturen.

2.7 Onderstel

De poten van het onderstel zijn traploos in breedte te verstellen. Het spreiden van de poten gaat elektrisch en wordt bediend met de handbediening.

Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is om de poten te spreiden. Als de poten klem komen, kan dit schade aan de lift of zijn omgeving opleveren.



De lift kan verreden worden met de poten in brede of in smalle stand. De keuze tussen de brede en de smalle stand hangt af van de benodigde en beschikbare ruimte (denk om deuren).

2.8 Wielen

De Raisa heeft vier zwenkwielen waarvan de achterwielen zijn voorzien van een rem. De achterwielen remmen het wiel in de rol- en in de draairichting (figuur 3).

De wielen hebben een erg lage rolweerstand door de volledig kogel gelagerde draaipunten.



Figuur 3 – Ongeremd



Op de rem

Het vanuit stilstand verrijden van de lift kost het minste kracht als de wielen van het onderstel al in het verlengde van de rijrichting staan.

2 Beschrijving

2.9 Low-zone band

De Raisa basic stalift wordt geleverd met een United Care low-zone band. Deze band is voorzien van druk verdeling elementen en een blauwe badstof hoes.

Deze low-zone band is speciaal ontworpen om de druk onder de armen zo veel mogelijk te beperken.

We voeren een aantal tilbanden voor de Raisa basic:

- Low-zone band, standaard band
- Low-zone band XL, verlengd model voor groter omvang
- Low-zone band met borstfixatie, band blijft beter op zijn plek
- Tilvest, de luxe, maat S-M-L-XL, voor extra steun tijdens de tranfer

2.9.1 De tilband clip

Lees deze aanwijzingen aandachtig door voordat u de tilband gebruikt. Het is ESSENTIEEL dat u volledig begrijpt hoe u de tilband op de juiste manier ophangt.




Controleer de tilband altijd op beschadigingen en slijtage.



Zie figuur

- 1 Houdt de strip van de clip met één hand vast, en trek het grote gat in de clip van de tilband over de kop van het ophangpunt, controleer of de band waar de clip van de tilband aan hangt niet gedraaid is
- 2 Pak de band onder de clip van de tilband en trek deze naar beneden, trek de clip van de tilband zover dat het ophangpunt in de beveiliging valt.
- 3 Het ophangpunt zit nu opgesloten in het gat boven in de clip.
- 4 Breng de tilband op spanning maar til nog niet. Controleer nogmaals of de clip goed zijn bevestigd.

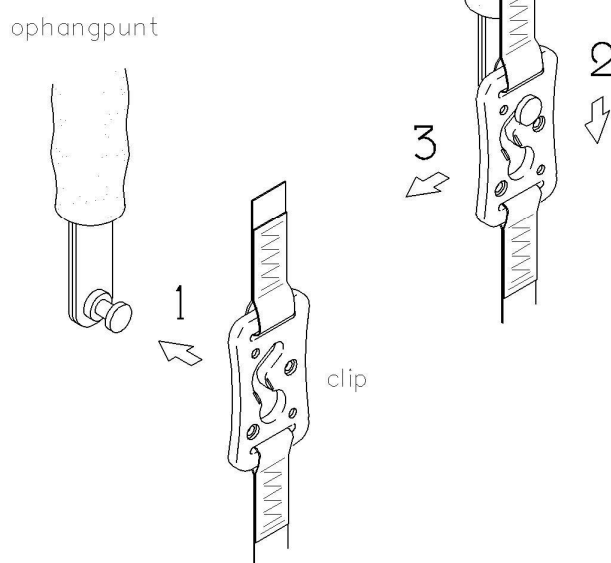

Figuur 4

2.9.2 Wasinstructie

De 'low-zone band' hoes mag gewassen worden.

Hoe de banden kunnen worden gewassen kun je aflezen aan de pictogrammen op de label. Dit is soms verschillend door gebruik van diverse materialen.



Tilbanden kunnen machinaal gewassen worden op 60 graden (indien anders, zie pictogram).



Band mag in de droger op lage temperatuur of



Band mag niet in de droger



Niet geschikt om chemisch te reinigen



Geen bleekmiddelen gebruiken



Band niet strijken

Controleer de tilbanden regelmatig op slijtage.

Gebruik bij het desinfecteren de juiste concentratie als aangegeven op de verpakking van het middel.

3 Gebruik

3.1 Ingebruikname

Controleer de Raisa voor gebruik op de volgende punten:

- Plaats de batterij
- Schakel de lift aan door de noodstop om te draaien
- Controleer de status van de batterij op de batterij-indicator op de Controlebox door de omhoog of beneden knop kort in te drukken.
- Controleer de staat van de low-zone band en/of tilvest.
- Controleer de staat van de clips
- Breng de tilband zorgvuldig aan

De Raisa klaar voor gebruik.

Zorg altijd voor een nette en schone werkomgeving.

3.2 Het laten staan van de zorgvrager

Stelt u zich vooraf altijd op de hoogte of de zorgvrager met de Raisa tot staan gebracht mag en wil worden!



Breng de zorgvrager op de hoogte dat de stalift wordt gebruikt.

Stap 1

Zet de Raisa aan (blz.5, §2.4.2). Zorg ervoor dat de hefarm in de laagste positie staat.

Stap 2

Breng de low-zone band aan bij de zorgvrager.
Achter de rug in het midden, uiteinden van de banden onder de oksels door en de armen van de zorgvrager buiten de band.

Stap 3

Rijd de lift aan. Indien nodig kunt u het onderstel verbreden door het bedienen van de handbediening (blz.5, §2.3).

Stap 4

Plaats de voeten van de zorgvrager op de voetenplaat.
Rijd de lift verder aan zodat de knieën zover mogelijk tegen de kniesteunen komen.

Stap 5

Bevestig de low-zone band aan de hefarm.
Altijd zo kort/strak mogelijk. Dit om de zorgvrager zo goed mogelijk tot staan te brengen. Zorg ervoor dat de clips goed aan de hefarm zijn bevestigd! Zorg er voor dat de band niet verdraaid zit bij het aanhaken.

Stap 6

Neem de handbediening en ga zo dicht mogelijk bij de zorgvrager staan. Leg zo mogelijk een hand op zijn of haar schouder. Druk op de omhoog knop van de handbediening om de zorgvrager tot staan te brengen. Breng de zorgvrager zo ver mogelijk tot staan. Dit is belangrijk voor u en de zorgvrager.

Zorg ervoor dat de zorgvrager met de voeten op de voetenplaat blijft staan!

Versmal zo nodig het onderstel doormiddel van de handbediening. De Raisa kan nu verreden worden. Bij een transfer naar of van het toilet kan de kleding tijdelijk worden verwijderd of weer op z'n plaats worden gebracht.

3.3 Het laten zitten van de zorgvrager

Stap 1

Rijd de Raisa zo dicht mogelijk aan bij stoel, bed of anderszins, waar u de zorgvrager wilt laten zitten.

Stap 2

Neem de handbediening en ga zo dicht mogelijk bij de zorgvrager staan.

Druk op de omlaag knop van de handbediening om de zorgvrager te laten gaan zitten. Zorg ervoor dat de hefarm helemaal teruggaat naar de beginpositie.

Stap 3

Maak de band los van de lift en rijd de lift weg.

Stap 4

Verwijder de low-zone band en/of tilvest achter de rug van de zorgvrager.

Stap 5

Zet de Raisa terug waar hij hoort te staan en druk de noodstop in. Dit voorkomt dat accu's langzaam leeglopen. (blz.6, §2.7).

3.4 Als de Raisa niet werkt

- Controleer of de noodstop uit staat (blz.5, §2.4.2).
- Controleer of de batterij voldoende geladen is (blz.6, §2.6).
- Controleer of de handbediening het doet.
- Controleer of de controle box bedieningen het doet
- Controleer of de stekkers goed in de controle box zijn gestoken.
- Als de lift het hierna nog steeds niet doet, waarschuw dan de technische dienst.

4 Onderhoud

4.1 Onderhoud

De Raisa basic is zo geconstrueerd dat onderhoud tot een minimum beperkt kan blijven.

Aangeraden wordt om de volgende onderhoudsplanning aan te houden :

Dagelijks en wekelijks onderhoud kan door de gebruikers van de Raisa basic gedaan worden.

Het ½ Jaarlijks onderhoud door een technische dienst. De Jaarlijkse inspectie en eventuele reparaties door United Care of andere daartoe bevoegde instanties.

Neem bij twijfel over de conditie van de lift altijd contact op met de TD of United Care.



4.1.1 Dagelijks onderhoud

De volgende handelingen kunnen door de gebruikers van de Raisa basic op dagelijks basis worden uitgevoerd.

De lift:

Controleer of alle delen van de lift aanwezig zijn zoals:

- Batterij
- Tilband
- Laadsnoer
- Handbediening

De low-zone banden en/of tilvesten:

Controleer voor gebruik de low-zone band en/of tilvest altijd op eventuele beschadigingen aan band of clips, rafelen van stof, loszittende stiksel en naden.

Bij waarneming van één de voorgaande beschadigingen, mag de band niet meer gebruiken.



Batterijen:

Batterij opladen. Zorg ervoor dat als je klaar bent met de lift je batterij controleert of deze op de lader moet.

4.1.2 Wekelijks onderhoud

De volgende handelingen kunnen door de gebruikers van de Raisa basic op wekelijkse basis worden uitgevoerd.

De lift:

- Het is aan te raden de lift wekelijks schoon te maken. Deze kan het best schoon gemaakt worden met huishoud schoonmaakmiddel en een goed uitgeknepen vochtige doek.
- Controleer de werking van de lift en de werking van de noodstop.
- Controleer of alle beweegbare delen gemakkelijk bewegen, zonder hinderlijke bijgeluiden.

De low-zone banden :

- De hoes van de low-zone band kan worden gewassen op 60 graden. Gebruik voor het desinfecteren de juiste concentratie zoals op de verpakking staat beschreven.

Batterijen :

- Het wordt aangeraden om de batterijen minimaal 1x per week op te laden (ook wanneer het niet wordt gebruikt).

Controleer de leesbaarheid van de serienummer sticker, de aanwezigheid van een handboek, quick reference kaart en logboek.

4.1.3 ½ Jaarlijks onderhoud

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het onderhoud dat de technische dienst elke half jaar aan de Raisa basic kan uitvoeren.

- Controleer de tilvest of low-zone banden visueel grondig op rafelen – losse naden/stiksels – schade, beschadigingen aan clips, bij schade ervan dient de band afgekeurd te worden.
- Controleer de werking van de noodstop.
- Probeer de noodneer bediening van de motor.
- Probeer de controle box bediening
- De lift grondig controleren op soepel bewegen van bewegende delen.
- De potenspreider moet zonder hinderlijk geluid bewegen.
- Wielen controleren of ze makkelijk draaien en of de rem goed werkt.
- Alle bouten dienen goed aangedraaid te zijn en dus niet los zitten.
- Controleer de lift op lak schade, dit kan het gevolg zijn van eventuele vervormingen.
- Controleer of de batterij goed wordt geladen en de behuizing in goede staat is.
- Controleer de bekabeling op zichtbare schade.
- Controleer ook de laadsnoer of er schade is.

Wanneer de lift niet voldoet aan één of meer van de bovengenoemde punten dient de lift tijdelijk buiten werking gezet te worden en contact opgenomen te worden met United Care.



4.1.4 Jaarlijks inspectie en onderhoud

Eén keer per jaar **moet** de lift volgens de NEN gekeurd worden. Dit dient te worden gedaan door United Care of door een ander daartoe bevoegde instantie. United Care biedt u de mogelijkheid om uw lift eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren, middels de Periodieke Inspectie Overeenkomst (PIO).

De eerst volgende inspectiedatum staat op de service controlesticker (zie het figuur hiernaast). Deze zit altijd op de lift, nabij de serienummer plaat. Voor meer informatie hierover kunt u telefonisch contact met United Care opnemen.




De service controle sticker (figuur 18) geeft aan op welke datum de volgende Periodieke Inspectie aan de Raisa basic moet worden uitgevoerd.



Ook laders dienen elk jaar geïnspecteerd te worden volgens de geldende voorschriften

4 Onderhoud

4.2 Onderdelenlijst Raisa basic

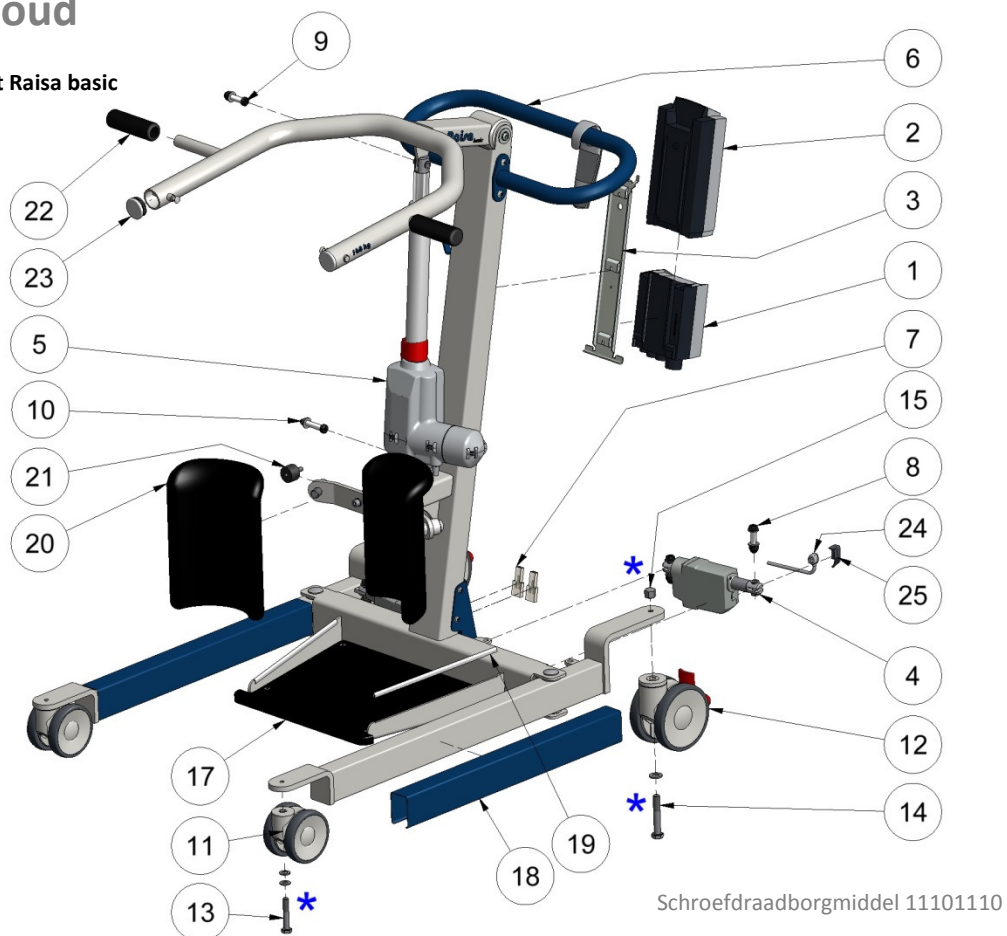

Schroefdraadborgmiddel 11101110

Pos	Benaming	Art.nr.
1	Controle box, interne lader, Jumbo Care Netsnoer 230Volt	11101500 17103190
2	Batterij PB Batterij Li-Ion	31101070 31101071
3	CB bevestigingsplaat	11100360
4	Motor La23, slag 30	11101440
5	Motor La34, slag 250	20100550
6	Handbediening, 4F, Jumbo Care	11101530
7	Kabelsplitser AMP, 3x 6,3	17105080
8	Pasbout set 26mm (4x)	11400390
9	Pasbout set 30mm (1x)	11400440
10	Pasbout set 40mm (1x)	11400500
11	Zwenkwiel 100mm, wit	22100170
12	Zwenkwiel 125mm, rem, wit	22100181

Pos	Benaming	Art.nr.
13	Zeskantbout M10x60 vz din931	11100300
14	Zeskantbout M12x75 vz din931	10101860
15	Dopmoer M12 elvz din917	20100400
16	Kabel afschermkap	11202690
17	Voetenplank	20100360
18	Pootkap blauw	20100530
19	Randbeschermer	20100510
20	Kniesteun	10100156
21	Kniesteunrubber	10100126
22	Handvat	10100256
23	Lamellenstop 40mm	20100520
24	Motorkabel La23	11101441
25	Motorkabel clip La23	11101442
..	..	..

Diversen

Low-Zone band (standaard)	10101034
Low-Zone band XL	10101044
Low-Zone band met borstfixatie	30101644
Tilvest, maat S, de luxe	30100352
Tilvest, maat M, de luxe	30100353

Tilvest, maat L, de luxe	30100354
Tilvest, maat XL, de luxe	30100355
Voetverhoogstuk 10cm	20400150
Kuit fixatie band	20400140
Losse batterijlader compleet	32106680

5 Appendix

5.1 Garantie bepalingen

United Care Products geeft 1 jaar garantie op de Raisa basic opstalift. United Care Products geeft geen garantie op onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage of onzorgvuldig gebruik, zoals wielen, tilbanden en batterijen.

Verder is de garantie niet van toepassing op schade of gebreken welke aan de Raisa basic opstalift kunnen ontstaan door verkeerd of onoordeelkundig gebruik en reparaties door derden. De beoordeling hiervan ligt bij United Care Products of bij een door United Care Products aan te wijzen vertegenwoordiger.

United Care Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het product aan te brengen in afwijking van hetgeen in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Hiervoor is geen verantwoording verschuldigd.

5.2 Verwijdering onderdelen

Alle onderdelen die vervangen of verwijderd worden en dus weggegooid worden, kunnen terug worden gestuurd naar United Care. Ook is het mogelijk deze onderdelen aan de monteur aan te bieden voor vernietiging. Wij zullen ervoor zorgen dat alle onderdelen op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

Wanneer u zelf zorgt voor de vernietiging ervan, dient u er rekening mee te houden dat alle delen milieuvriendelijk worden verwerkt. Batterijen horen b.v. bij het klein chemisch afval.



!! HET MILIEU IS VAN ONS ALLEMAAL !!

5.3 Over United Care

Het uitvoeren van verplaatsingen in de gezondheidszorg vraagt van veel partijen grote inspanningen en met name van zorgverleners een grote deskundigheid.

United Care is een bedrijf dat zich met diensten en producten richt op mensen die dagelijks betrokken zijn bij de uitvoering van transfers. Daarbij is de mobiliteit van de zorgvrager het uitgangspunt: samen met zorgverleners en zorgvragers wordt gewerkt aan oplossingen die de mobiliteit van de zorgvrager behouden en/of verbeteren. Door aan te sluiten bij, en gebruik te maken van de bewegingsmogelijkheden van de zorgvrager wordt gestreefd naar een optimale kwaliteit van zorg voor de zorgvrager en een verbetering van de kwaliteit van arbeid voor de zorgverlener.

United Care levert daarvoor de volgende producten/diensten:

- Tilliften
- Opstaliften
- Bedliften
- Plafondliften
- Hoog-laag baden
- Bedden
- Po- en douchestoelen
- Douchebrancards
- Overige transfermiddelen
- Accessoires bij transfermiddelen
- Training en advies

De visie, diensten en producten van United Care maken haar een uitstekende partner in de samenwerking met zorgverleners en zorgvragers.

5.4 Contact

United Care Products BV
Bremenweg 5
9723 TC, Groningen
Telefoon 050 - 305 09 00
Fax 050 - 305 09 01
www.unitedcare.nl
info@unitedcare.nl

5 Appendix

5.5 EG- Verklaring van overeenstemming

Wij: United Care Products BV
Bremenweg 5
9723 TC, Groningen
Nederland

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de:

'Raisa basic' opsta lift

waarop deze verklaring betrekking heeft en welke valt onder klasse I van de Europese richtlijn medische hulpmiddelen, in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende richtlijn:

Richtlijn 93/42/EEG

en in overeenstemming is met de volgende normen of andere normatieve documenten:

NEN-EN-ISO 14971
ISO 10535
NEN-EN-60601-1
NEN-EN-60601-1-2 (EMC)
NEN-EN-ISO 15223:2012
NEN-EN 12182:2012

Namens United Care Products BV,

Plaats en datum : Groningen, 20 februari 2015

Naam en functie : J. Stevenson, directeur

Handtekening

